




Respironics OptiChamber Diamond


OptiChamber Diamond le ayuda a llevar el medicamento de su inhalador a sus pulmones, donde funciona.

Siga atentamente estas instrucciones y lea también las instrucciones de uso que se encuentran dentro de la caja de OptiChamber Diamond.


Cómo usar la cámara con válvula antiestática OptiChamber Diamond

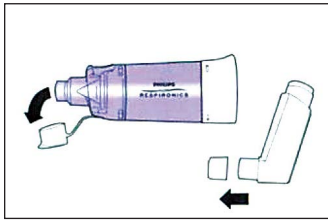


1. Quite el tapón del inhalador y el de la cámara.

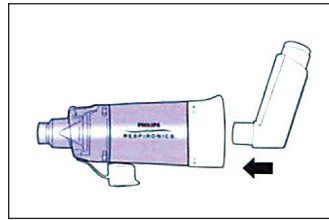

2. Introduzca el inhalador en la parte posterior de la cámara.

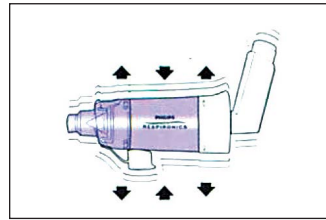


3. Agite la cámara y el inhalador siguiendo las instrucciones del inhalador.

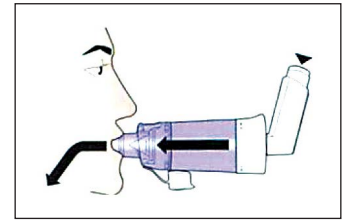

4. Coloque los labios apretados alrededor del adaptador bucal y exhale. Dispare una dosis de medicamento y, de inmediato, inhale lentamente, respirando bien profundo.*




5. Contenga la respiración durante 8 segundos y luego exhale. Si la alerta de flujo «silba», inhale más lentamente.

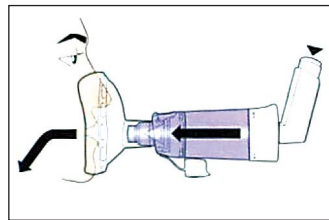


6. Si usa una mascarilla, colóquese sobre la nariz y la boca. Dispare una dosis de medicamento y mantenga la mascarilla colocada en forma ajustada mientras inhala 5 o 6 veces.*

* Si tiene indicado aplicarse más de una dosis, espere un minuto y luego repita desde el paso 4 al 6.


Limpieza semanal de la cámara y la mascarilla

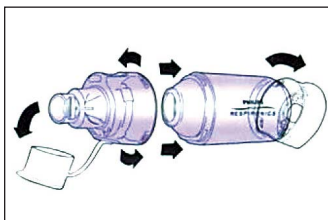


1. Quite el tapón, gire el adaptador bucal para desarmarlo, quite la tapa posterior y la mascarilla (si la usa).

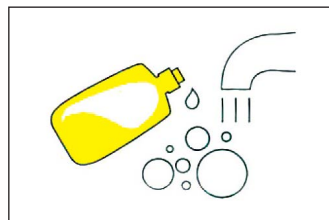

2. Agite las piezas durante 2 minutos, luego póngalas en remojo durante 10 minutos en agua jabonosa tibia.

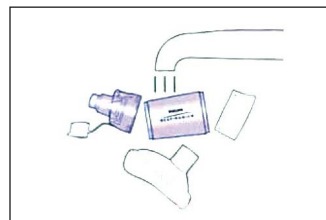

3. Enjuague las piezas con agua limpia tibia y déjelas secar al aire.

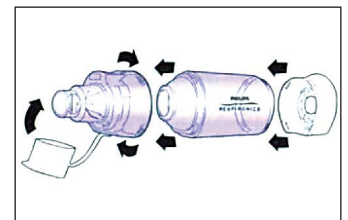

4. Vuelva a armar la cámara y guárdela en un lugar limpio y seco.

